

MoliCare® premium lady Pads

Description générale du produit/utilisation prévue

Les protections MoliCare® premium lady Pads sont des protections non stériles de forme anatomique destinées au contrôle de la faiblesse vésicale très légère à modérée ainsi qu'à l'incontinence fécale. Les produits peuvent être utilisés dans le cadre des soins à domicile et au sein des établissements de soins de santé professionnels. Leur application peut être réalisée par des personnes profanes comme par des professionnels des soins de santé. Les protections sont à usage unique et doivent être changées régulièrement en fonction des besoins. Les produits MoliCare® premium lady sont des dispositifs médicaux de classe I.

Application/indication

Les produits MoliCare® premium lady Pad sont conçus pour l'absorption de l'urine et des matières fécales* en cas d'incontinence.

* seulement MoliCare® premium lady Pads 4 – 5 gouttes.

Numéros de référence

Article	Numéro de référence*	Nombre d'unités par conditionnement
MoliCare® premium lady Pad 0,5 goutte	168 056	28 unités
MoliCare® premium lady Pad 1 goutte	168 035	12 unités
MoliCare® premium lady Pad 1,5 gouttes	168 036	12 unités
MoliCare® premium lady Pad 2 gouttes	168 044	12 unités
MoliCare® premium lady Pad 3 gouttes	168 045	12 unités
MoliCare® premium lady Pad 4 gouttes	168 046	14 unités
MoliCare® premium lady Pad 4,5 gouttes	168 049	14 unités
MoliCare® premium lady Pad 5 gouttes	168 051	14 unités
MoliCare® premium lady Pad 0,5 goutte	168 057	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 1 goutte	168 058	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 1,5 gouttes	168 059	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 2 gouttes	168 060	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 3 gouttes	168 062	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 4 gouttes	168 063	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 4,5 gouttes	168 064	1 unité
MoliCare® premium lady Pad 5 gouttes	168 065	1 unité

* Il est possible que la gamme de produits ne soit pas disponible dans tous les pays

Dispositif à usage unique

La réutilisation d'un dispositif médical à usage unique est dangereuse. Le retraitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut gravement nuire à leur intégrité et à leurs performances. Informations disponibles sur demande. La réutilisation du produit pourrait entraîner une contamination microbiologique et/ou de légères infections cutanées.

MoliCare® premium lady Pads

Élimination du produit

Afin de minimiser le risque d'infections potentielles ou de pollution environnementale, les composants jetables de MoliCare® premium lady Pads doivent être mis au rebut conformément aux procédures d'élimination stipulées dans les lois, règlements, réglementations et normes de préventions des infections locales et en vigueur.

Déclaration d'incident

Pour un patient/utilisateur/tiers situé dans l'Union européenne ou dans des pays disposant de réglementations identiques (Règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux) ; si, au cours de l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de son utilisation, un incident grave est survenu, veuillez déclarer celui-ci au fabricant et/ou son représentant autorisé, ainsi qu'à l'autorité de votre pays.

Caractéristiques de performance du produit

Caractéristiques	0,5 goutte	1 goutte	1,5 gouttes	2 gouttes	3 gouttes	4 gouttes	4,5 gouttes	5 gouttes
Poids total [g]	4,2	7,5	9,3	14,4	20,8	32	33,7	38,1
Poids du coussin absorbant [g]	2,6	5,4	7,2	11,2	16,2	26,7	28,4	32,8

≤ ± 10 % de tolérance

Caractéristiques physiques

Composant	Matériau
Face supérieure	Polypropylène et polyéthylène - non tissé, hydrophile, blanc
Coussin absorbant :	<ul style="list-style-type: none"> • pâte kraft* (sauf 0,5 goutte) • Polymère superabsorbant (sauf 0,5 goutte) • Agent tampon pH (sauf 0,5 goutte) • Non-tissé, hydrophile, blanc (sauf 0,5 goutte) • Airlaid (uniquement pour 0,5 goutte)
Face arrière	Face externe en textile respirant, blanc
Élastiques	Film élastique pour les barrières de jambe (sauf pour 0,5, 1 et 1,5 gouttes)
Adhésifs	Thermofusibles
Renfort	1 goutte, 1,5 goutte, 2 gouttes et 3 gouttes : film de polyéthylène pour enroulement unique avec ruban de relâche et papier silicone 0,5 goutte, 4 gouttes, 4,5 gouttes et 5 gouttes : papier silicone

*blanchie sans chlore élémentaire

Caractéristiques du produit

Dimensions en mm	0,5 goutte	1 goutte	1,5 gouttes	2 gouttes	3 gouttes	4 gouttes	4,5 gouttes	5 gouttes
Longueur totale	175	220	220	265	335	400	400	400
Largeur totale	76	98	98	112	132	162	162	162
Longueur du coussin absorbant	145	200	200	233	305	365	365	365

Fiche technique

MoliCare[®] premium lady Pads

Largeur du coussin absorbant	45	78	78	90	112	138	138	138
------------------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

≤ ± 10 % de tolérance

Étiquetage

N° de lot avec code à 9 caractères

p. ex. : 300102822



4	001	02	82	2
année 202X	clé interne	clé interne	clé interne	total de contrôle cumulé

Date de fabrication

p. ex. :  2024 année 06 mois 02 jour

Date de péremption

p. ex. :  2029 année 06 mois 02 jour

Durée de conservation : 5 ans

Dispositif médical



Numéro d'identification unique du dispositif (IUD)



Maintenir au sec



Ne pas réutiliser



Marquage CE



Date de la dernière révision : 07/08/2024