

MoliCare® premium lady Pads

Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

MoliCare® premium lady Pads zijn niet-steriele, anatomisch gevormde kompressen voor zeer licht tot matig urineverlies evenals ontlastingsincontinentie. De producten kunnen worden gebruikt in de thuiszorgomgeving en professionele zorginstellingen en het aanbrengen kan worden uitgevoerd door leken en/of zorgverleners. De inleggers zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten regelmatig worden vervangen als dit nodig is. De MoliCare® premium lady Pad-inleggers behoren tot klasse I medische hulpmiddelen.

Toepassing/indicatie

MoliCare® premium lady Pad-inleggers zijn bedoeld voor het absorberen van urine en feces* bij incontinentie.

**alleen MoliCare® premium lady Pads 4 – 5 druppels.*

Catalogusnummers

Artikel	Referentienummer*	Verpakkingsinhoud
MoliCare® premium lady Pad 0,5 druppel	168 056	28 stuks
MoliCare® premium lady Pad 1 druppel	168 035	12 stuks
MoliCare® premium lady Pad 1,5 druppels	168 036	12 stuks
MoliCare® premium lady Pad 2 druppels	168 044	12 stuks
MoliCare® premium lady Pad 3 druppels	168 045	12 stuks
MoliCare® premium lady Pad 4 druppels	168 046	14 stuks
MoliCare® premium lady Pad 4,5 druppels	168 049	14 stuks
MoliCare® premium lady Pad 5 druppels	168 051	14 stuks
MoliCare® premium lady Pad 0,5 druppel	168 057	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 1 druppel	168 058	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 1,5 druppels	168 059	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 2 druppels	168 060	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 3 druppels	168 062	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 4 druppels	168 063	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 4,5 druppels	168 064	1 stuk
MoliCare® premium lady Pad 5 druppels	168 065	1 stuk

**mogelijk niet verkrijgbaar in alle landen*

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Het hergebruiken van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het recyclen van hulpmiddelen om ze opnieuw te kunnen gebruiken kan leiden tot ernstige beschadigingen en een sterk verminderde werking. Informatie beschikbaar op verzoek. Hergebruik van het product kan leiden tot microbiologische verontreiniging en/of milde huidinfecties.

MoliCare® premium lady Pads

Verwijdering van het product

Om het risico van mogelijke infectiegevaars of milieuvervuiling te minimaliseren, moeten wegwerpcomponenten van MoliCare® premium lady Pads worden afgevoerd volgens de geldende en plaatselijke wetten, regels, voorschriften en infectiepreventienormen.

Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

Prestatiekenmerken van het product

Kenmerken	0,5 druppel	1 druppel	1,5 druppels	2 druppels	3 druppels	4 druppels	4,5 druppels	5 druppels
Totaal gewicht [g]	4,2	7,5	9,3	14,4	20,8	32	33,7	38,1
Gewicht absorptiekern* [g]	2,6	5,4	7,2	11,2	16,2	26,7	28,4	32,8

≤ ± 10% toegestane afwijking

Materiaaleigenschappen

Onderdeel	Materiaal
Bovenlaag	Polypropyleen en polyethyleen – non-woven, hydrofiel, wit
Absorberende kern:	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftpulp*(uitgezonderd 0,5D) • Superabsorberend polymeer (uitgezonderd 0,5D) • pH-buffermiddel *(uitgezonderd 0,5D) • Non-woven, hydrofiel, wit *(uitgezonderd 0,5D) • Airlaid (alleen voor 0,5D)
Buitenzijde	Ademende buitenzijde uit textiel, wit
Elastieken	Elastische film voor beenmanchet (behalve 0,5, 1 en 1,5 druppels)
Kleefmiddelen	Smeltlijm
Buitenlaag	1D, 1,5D, 2D en 3D: Polyethyleenfolie voor enkelvoudig wikkelen met beschermingstape en siliconenpapier 0,5D, 4D, 4,5D en 5D: siliconepapier

*elementair chloorvrij gebleekt

Productkenmerken

Afmetingen in mm	0,5 druppel	1 druppel	1,5 druppels	2 druppels	3 druppels	4 druppels	4,5 druppels	5 druppels
Totale lengte	175	220	220	265	335	400	400	400
Totale breedte	76	98	98	112	132	162	162	162
Lengte absorberende kern	145	200	200	233	305	365	365	365

Technische

MoliCare[®] premium lady Pads

Breedte absorberende kern	45	78	78	90	112	138	138	138
---------------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

≤ ± 10% toegestane afwijking

Etikettering

Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.: 300102822



4	001	02	82	2
jaar 202X	interne code	interne code	interne code	gecumuleerd controlegetal

Productiedatum

bijv.:		2024	06	02
		jaar	maand	dag

Vervaldatum

bijv.:		2029	06	02
		jaar	maand	dag

Houdbaarheid: 5 jaar

Medisch hulpmiddel



Unieke hulpmiddelidentificatie (UDI)



Droog bewaren



Niet opnieuw gebruiken



CE-markering



Laatste herzieningsdatum: 7-8-2024