

LA **GASTROSTOMIE PERCUTANÉE ENDOSCOPIQUE (GPE) FLOCARE** EST CONÇUE POUR ÊTRE PLACÉE SUIVANT LA TECHNIQUE DE GUIDE "PULL", SOUS CONTRÔLE ENDOSCOPIQUE.

L'alimentation par sonde GPE est indiquée pour une alimentation par sonde à long terme (>2-3 semaines). La GPE peut éviter les inconvénients liés à l'utilisation d'une sonde nasogastrique à long terme, et peut augmenter la mobilité du patient.

Sauf en cas de contre-indications, la mise en place d'une GPE est possible chez des patients souffrant de maladies diverses. La GPE s'utilise souvent pour les patients neurologiques, handicapés ou avec un retard mental, ayant des maladies chroniques ou dénutris.

Placement

Le placement d'une GPE est une intervention médicale. L'intervention - qui dure en général 10 à 20 minutes - se fait normalement sous anesthésie locale ou sous sédation légère. Consultez la carte d'instruction sur la mise en place de la sonde GPE pour plus d'information à ce propos.

Entretien

- Le disque de fixation externe et le clamp de sécurité bleu doivent être relâchés 24 heures après le placement de la GPE. Respecter une distance d'environ 5 mm entre le disque de fixation externe et la peau afin de pouvoir poser une compresse stérile en Y sous le disque de fixation externe. (fig. 1)




- Inspecter quotidiennement l'état de la stomie pour détecter d'éventuelles rougeurs et suintements. Désinfecter la peau tous les jours. Une fois la stomie cicatrisée, il suffit de nettoyer, rincer et sécher minutieusement la peau autour de la stomie.
- Garder le clamp de sécurité bleu en place pendant les soins de la plaie; le clamp indique la position correcte du disque de fixation externe et garantit le maintien initial après les soins.

Prévenir l'incrustation du disque de fixation interne après cicatrisation de la stomie :

- Libérer la sonde du disque de fixation externe, tout en laissant le clamp bleu en place
- Glisser précautionneusement le disque de fixation externe en haut et laver la peau et la sonde à l'eau et au savon
- Bien rincer et sécher la peau et la sonde
- Glisser la sonde +/- 1,5 cm dans l'estomac, afin d'éviter tout dégât à la paroi de l'estomac
- Eventuellement tourner la sonde 180° et la repositionner à son endroit initial

- Glisser le disque de fixation externe à son endroit initial, juste devant le clamp de sécurité bleu et fixer la sonde dans le disque (fig. 2)

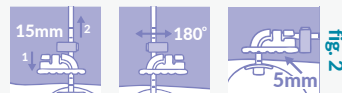


Contrôler la position de la GPE:

- Contrôler la position du disque de fixation externe par les indications de distance en cm sur la Flocare GPE.
- Contrôler la position de la Flocare GPE avec du papier indicateur. (fig. 3)



Ces contrôles s'imposent à chaque administration d'alimentation ou de médicament, s'il y a un doute quant à la position de la sonde et au moins 3 fois par jour.

- Rincer la sonde avec 20-50 ml d'eau avant et après l'administration de l'alimentation par sonde ou de médicaments et au moins toutes les 8 heures afin d'éviter que la sonde ne se bouche. (fig. 4)

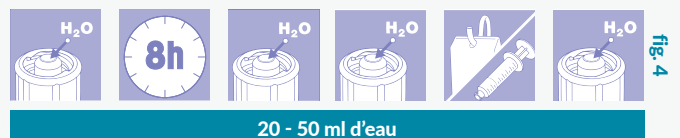



- Contrôler l'état de la sonde tous les jours. Tout changement significatif (couleur, fissures, fuites, etc.) doit être communiqué au médecin traitant.
- Toujours laisser le clamp de sécurité à sa place.
- Ne pas utiliser de désinfectants comme le Povidone-Iodine (PVP-I; par exemple: Iso-Betadine®, Braunol®) et Octenidindihydrochloride- Phenoxyethanol (par exemple: Octenisept®) ; ces produits pourraient altérer les caractéristiques physiques et/ou mécaniques de la sonde. L'utilisation de produits à base de Polyhexanide (par exemple Prontosan, Prontosan C.) est recommandée.



RINÇAGE ET UTILISATION DE SERINGUES

- Pour le rinçage de la sonde, utiliser toujours une seringue de plus de 20 ml et assurer un débit régulier.
- Pour l'administration de médicaments, utiliser toujours une seringue adaptée au volume à administrer et assurer un débit régulier.
- Ne jamais forcer. En cas de résistance, arrêter la procédure et solliciter l'aide du personnel soignant.

Durée d'utilisation

La GPE est conçue pour une utilisation de plusieurs mois, néanmoins sa durée de vie peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la médication, le pH gastrique, la motilité du patient et l'entretien de la GPE. Le retrait et le remplacement d'une sonde sont déterminés par les performances du produit et/ou doivent être réalisés sous contrôle médical.

- Les problèmes d'occlusion peuvent être évités si la GPE est bien rincée avant et après chaque administration de nutrition et/ou de médicaments.
- Préférer l'utilisation de médicaments liquides quand cela est possible.
- Eviter l'utilisation de substances acides, telles que le jus de canneberges ou les sodas pour le rinçage de la GPE car l'association avec les protéines contenues dans la poche de nutrition peut engendrer l'obstruction de la sonde.

Retrait


- La sonde ne doit pas être enlevée avant 10 jours après la pose ou jusqu'à ce que la stomie soit formée.
- Contrôler par endoscopie la position de la sonde après 8 à 10 mois.
- Le retrait et le remplacement d'une sonde sont déterminés par les performances du produit et/ou doivent être réalisés sous contrôle médical.
Pour enlever la GPE Flocare®, couper la sonde au niveau de la peau. Le disque interne et le reste de la sonde doivent être enlevés par endoscopie.
- La GPE Flocare® peut être remplacée par une gastrostomie de remplacement (Sonde de Gastrostomie Flocare®).
- Après retrait de la GPE, la prise orale d'aliments peut seulement commencer après accord médical.





- Pour des patients chez qui une endoscopie ne peut pas être pratiquée, ou un retrait par endoscopie n'est pas nécessaire, la GPE peut être coupée au niveau de la peau et retirée ce qui permet au disque de rétention interne d'être éliminé par voie naturelle. Cette façon de faire peut entraîner un risque de complications ou une occlusion intestinale.
- Un suivi attentif du patient est donc essentiel.
- Cette méthode est contre-indiquée en pédiatrie et chez des patients ayant déjà subi une intervention chirurgicale.

VOUS SOUHAITEZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU UN CONSEIL?

Contactez Nutricia Advanced Medical Nutrition

 070/222.307

 medical.nutrition@nutricia.be

 www.nutriciamedical.be