

# Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip

## MEDISCH HULPMIDDEL

### Algemene productbeschrijving/beoogd gebruik

Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip is een niet-geweven, cohesief, flexibel verband dat met de hand kan worden afgescheurd voor eenvoudige toepassing. Dankzij het cohesieve (zelfhechtende) ontwerp blijft het verband op zijn plaats en glijdt niet weg. Het wordt gebruikt door leken en professionele zorgverleners om wondverband te fixeren, is ook geschikt voor een laag immobilisatie-effect en voor lichte compressie bij verstuikingen en verrekkingen, en speelt voornamelijk een rol bij het omwikkelen en fixeren.

Classificatie: Medisch hulpmiddel klasse I niet-steriel

### Toepassing/indicatie

Open de productverpakking, haal het verband uit de verpakking wanneer u klaar bent om het te gebruiken.

- Voor fixatie van wondverband of medische hulpmiddelen zoals slangen en katheters: breng verband van de juiste lengte aan om de gebieden die gefixeerd moeten worden.
- Voor ondersteuning en bescherming bij verstuikingen en verrekkingen: breng verbanden van de juiste lengte aan om verstuikte ledematen te immobiliseren of wikkel rond sportzones die steun en bescherming nodig hebben.

### Catalogusnummers

REF	Productnaam	Kleur	maat	Talen	Verpakkingsinhoud
300084	Peha-haft® easy	Wit	6 cm x 4 m	DE, FR, NL, EN	P1
300085	Peha-haft® easy	Wit	8 cm x 4 m	DE, FR, NL, EN	P1
300086	Peha-haft® easy	Wit	6 cm x 4 m	ES, IT, PT, PL	P1
300087	Peha-haft® easy	Wit	8 cm x 4 m	ES, IT, PT, PL	P1
300088	Peha-haft® easy	Wit	6 cm x 4 m	HU,SK,CZ,BG	P1
300089	Peha-haft® easy	Wit	8 cm x 4 m	HU, SK, CZ, BG	P1
300090	DermaPlast® easy-rip	Wit	2,5 cm x 4 m	DE,FR,IT	P1
300091	Dermaplast® easy-rip	Wit	4 cm x 4 m	DE,FR,IT	P1
300092	Dermaplast® easy-rip	Wit	6 cm x 4 m	DE,FR,IT	P1
310080	Peha-haft® easy	Blauw	6 cm x 4 m	DE, FR, NL, PL,	P1
310081	Peha-haft® easy	Blauw	8 cm x 4 m	DE, FR, NL, PL,	P1

### Waarschuwingen

- Dit product is voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken.
- Dit product komt niet in direct contact met de wond.
- Controleer vóór gebruik of de verpakking intact is en gebruik binnen de vervaldatum.

### Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

# Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip

Hergebruik van een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is gevaarlijk. Het herverwerken van hulpmiddelen voor hergebruik kan de integriteit en de prestatie van de producten ernstig schaden. Informatie op aanvraag beschikbaar.

## Afvoeren van het product

Om het risico of infectie of milieuvervuiling tot een minimum te beperken, moeten bij het weggooien van de wegwerpbare delen van Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip de verwijderingsprocedures worden gevolgd in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wet- en regelgeving, voorschriften en infectiepreventiestandaarden.

## Melding van incidenten

Voor een patiënt/gebruiker/derde in de Europese Unie en in landen met een vergelijkbaar wetstelsel (Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen); als tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is voorgevallen, meld dit dan bij de fabrikant en/of zijn gemachtigde en bij de betreffende nationale instantie.

## Prestatiekenmerken van het product

Productkenmerken	Vereiste
Productsamenstelling	Het materiaal van de achterkant: 90% niet-geweven stof (polypropyleen)+ 10% elastaan (polyurethaan) Kleefmateriaal: synthetisch kleefmiddel Kern: Het materiaal van de kernbuis is papier/karton.
Hechtkracht (cohesiekracht)	0,8-3 N/inch
Elasticiteitsverhouding	100%
Gestreckte lengte	4,0 m
Breedte	2,5 cm; 4,0 cm; 6,0 cm; 8,0 cm
Gramsgewicht	36g/m <sup>2</sup>
Fysische toestand	Het product heeft geen duidelijke oneffenheden.

## Etikettering

### Partijnr. met 9-cijferige code

bijv.:



3

999

XXXXX

Laatste getal van het huidige jaar

Productieserie-nummer

alleen bestemd voor interne doeleinden

### Productiedatum

bijv.:



2022

03

01

jaar

maand

dag



# Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip

## Vervaldatum

bijv.:  2025 03 01  
jaar maand dag

Houdbaarheid: 3 jaar

## Medisch hulpmiddel

**MD**

## Unieke hulpmiddelidentificatie

**UDI**

## Wettelijke fabrikant



Winner Medical Co., Ltd.  
Winner Industrial Park, No.660 Bulong Road  
Longhua District, 518109 Shenzhen  
VOLKSREPUBLIC CHINA

## EC-REP

**EC REP**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Duitsland

## CH-REP

**CH REP**

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Zwitserland

## Invoerder



EU invoerder:  
PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann Straße 12  
89522 Heidenheim, DUITSLAND  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)



# Peha-haft® easy / DermaPlast® easy-rip

CH invoerder  
IVF HARTMANN AG  
Victor-von-Bruns-Strasse 28  
8212 Neuhausen, Zwitserland  
[www.ivf.hartmann.info](http://www.ivf.hartmann.info)

Revisiedatum van de tekst: 12-1-2024